

使用說明書

防護面罩

商品型號：FG-F10M

非常誠摯感謝您購買本商品，使用前請仔細閱讀此說明書。
請務必閱讀『安全須知』，請將此說明書保存於方便隨時取用閱讀之處。



產品特點

本防護面罩使用液晶技術所研發之表面反射抑制技術(蛾眼抗反射結構※)
[特點]

1. 低反射功能

- 環境反射光源不易進入，使穿戴者能擁有清晰的視野。
- 環境光源不易倒映於面罩上，穿戴時臉部依然能被清楚辨視。

2. 防霧氣功能

- 水滴會在產品表面擴散，可以加速水份的乾燥，因此可以防止霧氣產生。

3. 高穿透功能

- 不易受到光源干擾，確保乾淨透明的視野。

※蛾眼抗反射結構及技術

蛾在黑暗中也能飛行，以工業技術製造出如同蛾的眼睛一般的100~200nm奈米級凹凸表面構造。依據細微的凹凸構造，使屈光率連續變化，可防止絕大多數光源的反射產生。

	蛾眼抗反射結構	一般結構
低反射 高穿透		
防霧		

包裝內容物：鏡框、防護片、說明書

規格	尺寸	重量	材質
鏡框	183mm x 153mm x 2.5mm	14g	聚碳酸酯
防護片	195mm x 268mm x 0.18mm	11g	聚碳酸酯、丙烯酸樹脂

安全須知 請確實遵守

■ 若操作錯誤導致的危險，依據以下區分說明

⚠ 警告 可能導致死亡或重傷

⚠ 注意 可能導致輕傷或財物損壞

■ 本文中所使用之符號說明

⊘ 表示必須『禁止』之行為

! 表示必須『遵守』之事項

⚠ 警告 為了預防受傷

- ⊘ 如有破損，請勿使用
- 禁止使用汽油、去漬油、煤油、酸性清潔劑、鹼性清潔劑做清潔
- 禁止分解、改造本產品及附屬品
- 禁止小孩讓小孩單獨使用
- 禁止放在嬰幼兒所及之處
- 禁止使用本產品說明書記載以外之功用
- 禁止穿戴產品駕駛汽車、機車及腳踏車

⚠ 注意 為了預防受傷

- ! 為了避免透明防護面罩外緣傷及手和臉，使用時請注意
- 若透明防護面罩有髒污或破損，建議停止使用
- 請遵守說明書記載之使用方法組裝使用本產品
- 若配戴途中皮膚有異常反應，請停止使用


使用方法

■ 本產品目的在於減低飛沫及粉塵沾附於臉上。本產品不適用於固體及火焰氣體之防護。


各部位名稱

組裝方法

鏡框

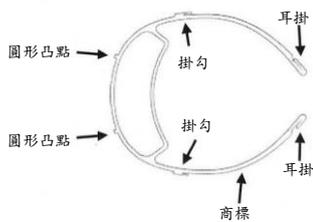

取出防護片

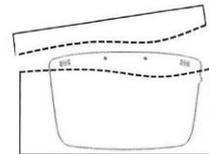


依照騎縫線可以將包裝打開，將防護片上有孔的那一段露出，透過將防護片裝置在鏡框上，可以防止指紋附著在防護片上。

安裝防護片




拆卸防護片

先從防護片中央的兩個孔 (3 和 4) 從框架上的凸起點卸下。再將 2 號孔從框架上的掛鉤卸下，最後卸下 1 號孔的掛鉤。

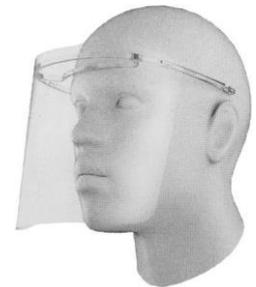


防護片

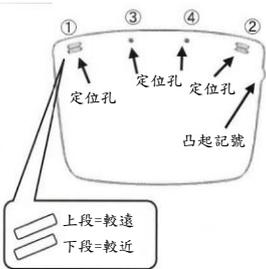

防護片角度的調整孔

防護片左右上方各有上下兩個長方形孔，可用來調整防護片與臉部的角度及空間。選擇上段定位孔時防護片的角度比較斜，與臉部較有空間。選擇下段定位孔時防護片的角度比較垂直，與臉部較為緊密。

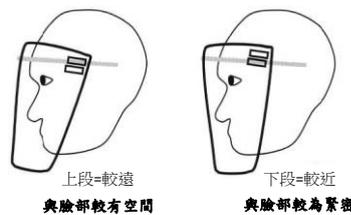

[事前準備]

將防護片上的凸起記號與 SHARP 商標置於同一側。

[安裝順序]

1. 先裝防護片兩端的 1 及 2 號孔，依照順序卡在框架的掛鉤上。
2. 再將防護片中央的 3 及 4 號孔卡在框架的圓形凸起點上。

[配戴]

1. 將鏡框兩端輕輕拉開，配戴在頭部舒適的位子。
2. 將鏡框前端與額頭吻合固定之。
3. 如果覺得太鬆，可使用一般橡皮筋穿過耳掛調整其鬆緊度。

保養方法

- 如防護片上有髒污時，請使用面紙、眼鏡布或是柔性軟布，沾上市售消毒用酒精（凝膠狀酒精除外）或是稀釋過的中性清潔劑輕柔擦拭。若有殘留酒精或中性清潔劑所產生的水斑，可以弄濕面紙後擰乾再做輕柔擦拭即可。因為防護片表面上有精密的加工處理，太用力擦拭可能會導致防護片表面的機能破損且失去其功能。
- 防護片如有無法清潔之髒污或是破損的狀況時，請更換新的防護片（另外販售）。

使用時需注意事項

- 如配戴時覺得頭部有壓迫感，可調整配戴位置或是在頭部與鏡框之間放入一個軟墊。
- 在有害的粉塵或空氣之環境下對眼睛無法有保護作用。
- 請將本產品保存於通風陰涼處，避免陽光直射。
- 使用本產品時，若感到肌膚有異狀，請立刻停止使用。
- 使用本產品時，若感到身體不適，請立刻停止使用。
- 如要丟棄本產品，請按照垃圾處理辦法進行丟棄。
- 請保存本產品在嬰幼兒無法碰觸到的適當地方。
- 請勿在火源附近使用及保存。